

Instruções para coleta de amostras

Para conhecer o potencial genético IGENITY de um animal, basta coletar uma simples amostra de pêlos.

Uma vez coletadas, essas amostras são encaminhadas diretamente ao laboratório. Os resultados ficam prontos em poucas semanas e são entregues sob a forma de escores, que variam de 1 a 10, para cada uma das características avaliadas.



1. Separe alguns pêlos da vassoura da cauda.



2. Certifique-se de que os pêlos estão livres de fezes ou detritos. As raízes (bulbos pilosos) precisam estar visíveis. São necessários, no mínimo, de 20 a 30 bulbos pilosos para uma boa coleta; para animais jovens (do nascimento ao desmame), recomenda-se a coleta de 40 a 60 bulbos pilosos.



3. Anote a identificação do animal no cartão coletor.



4. Abra o cartão coletor, destacando a cobertura plástica.



5. Insira a raiz dos pêlos no meio do cartão coletor. Feche-o, selando a cobertura plástica sobre os pêlos.



6. Apare o excesso de pêlos que sobram para fora do cartão coletor. Acondicione todos os cartões nos sacos plásticos para envio das amostras. Coloque-os de volta na embalagem do kit de coleta IGENITY e envie, com porte pago, pelos Correios.

Para solicitar os cartões coletores para envio de amostras, basta entrar em contato com o representante IGENITY de sua preferência. Para conhecer o representante de sua região entre em contato conosco pelo 0800 888 8484.

Após a coleta, preencha o formulário de pedido em anexo e envie para o endereço indicado abaixo. Caso tenha recebido os cartões através dos Correios, utilize a própria embalagem recebida para encaminhar as amostras coletadas, através de porte pago pela Merial.

Endereço para envio de amostras:

Laboratório IGENITY
CP 1303
Araçatuba - SP
CEP 16025-970

IGENITY® é marca registrada da Merial Saúde Animal Ltda.